

Sistema de Mini pilares ML

El sistema de Mini pilares ML es indicado para corregir las diferencias de altura y angulación en prótesis atornilladas múltiples otorgándole pasividad a la supraestructura.

Mini pilares rectos

Seguridad y confiabilidad


Nuevo tornillo (TH.000.M203)
más resistente.
Torque recomendado **32 N.cm**

Restauraciones

El sistema cuenta con
variedad de pilares:



Temporario

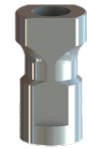

Transfer



Calcinable



Protector

Conexiones

Disponibile para todos los
sistemas de implantes ML
SH_e, **SH_i**, **SR_i** e
implantes compatibles de
otras marcas.

Variedad

Amplio rango de alturas
y plataformas.



Mini pilares rectos ML

MEDIDAS

SHe



| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| Mini pilar recto plataforma 3,45 alt. 2 SHe | PMUE.3520 |
| Mini pilar recto plataforma 3,45 alt. 4 SHe | PMUE.3540 |
| Mini pilar recto plataforma 4 alt. 2 SHe | PMUE.4020 |
| Mini pilar recto plataforma 4 alt. 3 SHe | PMUE.4030 |
| Mini pilar recto plataforma 4 alt. 4 SHe | PMUE.4040 |
| Mini pilar recto plataforma 4 alt. 5 SHe | PMUE.4050 |
| Mini pilar recto plataforma 5 alt. 2 SHe | PMUE.5020 |
| Mini pilar recto plataforma 5 alt. 4 SHe | PMUE.5040 |

SHi



| | |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Mini pilar recto plataforma 4 slim alt. 1 SHi | PMUI.4110 |
| Mini pilar recto plataforma 4 slim alt. 2 SHi | PMUI.4120 |
| Mini pilar recto plataforma 4 alt. 1 SHi | PMUI.4010 |
| Mini pilar recto plataforma 4 alt. 2 SHi | PMUI.4020 |
| Mini pilar recto plataforma 4 alt. 3 SHi | PMUI.4030 |
| Mini pilar recto plataforma 5 alt. 1 SHi | PMUI.5010 |
| Mini pilar recto plataforma 5 alt. 2 SHi | PMUI.5020 |


SRI



| | |
|--------------------------------------------|-------------|
| Mini pilar recto plataforma 3,5 alt. 1 SRI | PMUI.3510.N |
| Mini pilar recto plataforma 3,5 alt. 2 SRI | PMUI.3520.N |
| Mini pilar recto plataforma 3,5 alt. 3 SRI | PMUI.3530.N |
| Mini pilar recto plataforma 4,3 alt. 1 SRI | PMUI.4310.N |
| Mini pilar recto plataforma 4,3 alt. 2 SRI | PMUI.4320.N |
| Mini pilar recto plataforma 4,3 alt. 3 SRI | PMUI.4330.N |
| Mini pilar recto plataforma 5 alt. 1 SRI | PMUI.5010.N |
| Mini pilar recto plataforma 5 alt. 3 SRI | PMUI.5030.N |

Para la colocación del Mini pilar utilice la punta para torquímetro hexagonal de 1,75 mm (DCH.170.M).

Aplique un torque de **32 N.cm** para ajustar el Mini pilar al implante dental (No exceda el torque recomendado).

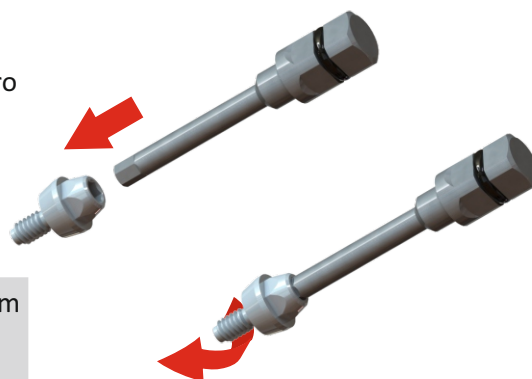

IMPORTANTE: La punta para torquímetro hexagonal de 1,75mm esta diseñada exclusivamente para el ajuste del componente Mini pilar, no para el transporte del mismo a la cavidad bucal

Mini pilares angulados 17°


Sistema

El sistema de Mini pilares angulados ML, sencillo y fácil de usar, está formado por dos partes: La base del Mini pilar y el cobertor.

Cobertor

Tornillo

Base MP

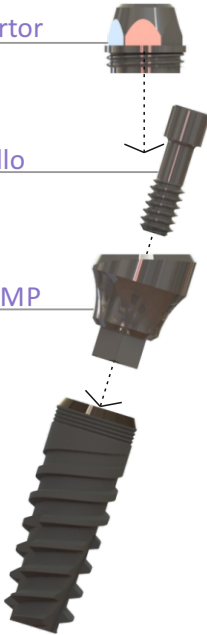

Presentacion

El mini pilar viene montado en un soporte plástico flexible para facilitar la inserción.



Conexiones

Disponibles para los sistemas de implantes ML **SHe**, **SHi** e implantes compatibles de otras marcas.



Variedad

Amplio rango de alturas y plataformas.

Mini pilares angulados 17º ML

MEDIDAS

NOTA: El Mini pilar angulado incluye: la base de MP, el tornillo, el montador y el cobertor de MP

SHe



| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| Mini pilar angulado plataforma 4 alt. 2 SHe | PMAE.4020 |
| Mini pilar angulado plataforma 4 alt. 3 SHe | PMAE.4030 |
| Mini pilar angulado plataforma 5 alt. 3 SHe | PMAE.5030 |

SHi



| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| Mini pilar angulado plataforma 4 alt. 1 SHi | PMAI.4010 |
| Mini pilar angulado plataforma 4 alt. 2 SHi | PMAI.4020 |
| Mini pilar angulado plataforma 4 alt. 3 SHi | PMAI.4030 |
| Mini pilar angulado plataforma 5 alt. 2 SHi | PMAI.5020 |

Accesorios para Mini pilares ML

MEDIDAS

Protector



| | |
|-------------------------------------------|-----------|
| Protector para Mini pilar plataforma 3,45 | PPMU.3500 |
| Protector para Mini pilar plataforma 4 | PPMU.4000 |
| Protector para Mini pilar plataforma 5 | PPMU.5000 |

NOTA: Incluyen tornillo (TH.000.M203).

Calcinables




| | |
|--------------------------------------------|-----------|
| Calcinable para Mini pilar plataforma 3,45 | PPMU.3501 |
| Calcinable para Mini pilar plataforma 4 | PPMU.4001 |
| Calcinable para Mini pilar plataforma 5 | PPMU.5001 |

NOTA: Incluyen tornillo (TH.000.M203).

Accesorios para Mini pilares ML

MEDIDAS

Temporario

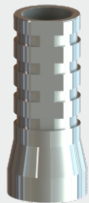

Temporario para Mini pilar plataforma 3,45
Temporario para Mini pilar plataforma 4
Temporario para Mini pilar plataforma 5

PLMU.3500
PLMU.4000
PLMU.5000

NOTA:Incluyen tornillo (TH.000.M203).

Transfer



Transfer para Mini pilar plataforma 3,45
Transfer para Mini pilar plataforma 4
Transfer para Mini pilar plataforma 5

PTMU.3501
PTMU.4001
PTMU.5001

NOTA:Incluyen tornillo (TH.050.M207).

Análogos



Análogo para Mini pilar Bronce plataforma 3,45
Análogo para Mini pilar Titanio plataforma 3,45
Análogo para Mini pilar Bronce plataforma 4
Análogo para Mini pilar Titanio plataforma 4
Análogo para Mini pilar Bronce plataforma 5
Análogo para Mini pilar Titanio plataforma 5

RMU.3502
RMU.3501
RMU.4002
RMU.4001
RMU.5002
RMU.5001